

医療用品（４） 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

プロソフト®
Prosoft®


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、ポリウレタン発泡体の積層体にアクリル系粘着剤を塗布した救急絆創膏である。
2. 本品を褥瘡等又はその周囲に貼付することにより、褥瘡等を衣類や寝具との接触から保護する。

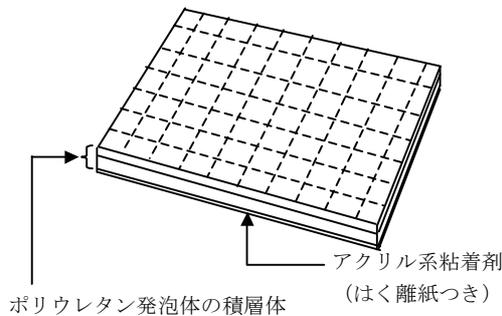

【使用目的、効能又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【品目仕様等】

滅菌済み

【操作方法又は使用方法等】

滅菌袋を開いて本品を取り出し、はく離紙をはがして創部又は創部の周囲に貼付する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により、皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）を起すことがある。本品の使用にあたっては、本品の効果と皮膚障害のリスクを十分考慮し、適正に使用すること。
- 2) 皮膚障害が起きやすい方には慎重に使用すること。皮膚障害の予防処置として、必要に応じて、本品を貼付する前に皮膚皮膜形成剤等の使用を考慮すること。
- 3) 本品の使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 4) 本品の使用中に、本品が原因と推察される臨床的感染が創部に起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

2. その他の注意

- 1) 使用時に包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 3) 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存

使用期限：袋に表示（自己認証データによる）

※ 本品は、ポリウレタン発泡体を使用しています。ポリウレタン発泡体は変色しやすい材質のため、黄ばんで見える場合もありますが、クッション性が著しく損なわれていなければ品質に問題ありません。

【包装】

品番	厚さ	サイズ	1袋	1箱
PS17S	17mm	190mm×270mm	1枚	5枚
PS25S	25mm	190mm×270mm	1枚	5枚

【製造販売業者及び製造業者の名称、住所等】

[製造販売元]

ニチバンメディカル株式会社

〒838-0815 福岡県朝倉郡筑前町野町字禅門橋 1713

TEL 0946-24-8021

[製造元]

ニチバンメディカル株式会社

[発売元]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

[お問合せ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

TEL 03-5978-5622

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）