

医療用品（４）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000
ケアリーヴ™
CARELEAVES™


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、高密度ウレタン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。
本品は滅菌済みである。

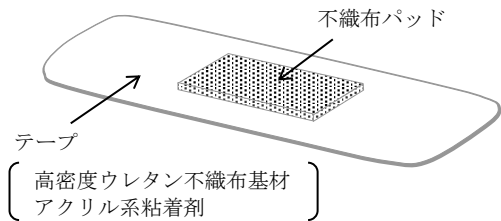

製品	テープ	パッド
Sサイズ	12mm×55mm	7.5mm×17mm
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm
Lサイズ	30mm×72mm	22mm×29mm
LLサイズ	50mm×70mm	25mm×35mm
ビッグサイズ	60mm×80mm	35mm×45mm
ジャンボサイズ	80mm×100mm	45mm×60mm
T型サイズ	58mm×55mm	16mm×30mm
円型サイズ	直径22mm	10mm×10mm
扇型サイズ	37mm×56mm	18mm×24mm
フリーサイズ	78mm×250mm	30mm×250mm
超大判Mサイズ	90mm×108mm	50mm×70mm
超大判Lサイズ	100mm×125mm	60mm×75mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 包装を開き、本品を取り出す。
- 2) はく離紙をゆっくりとはがし、創部にパッドをあて、周りのテープ部をしっかりと押さえて皮膚に密着させる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1) 創部が汚れている場合は、創部及びその周辺の皮膚をよく洗浄し、水気がある場合にはふきとってから使用すること。
- 2) テープを伸ばさずに貼ること。

- 3) 皮膚の薄い箇所など、皮膚刺激が出やすい箇所への使用は控えること。
- 4) 本品の使用中に、創部に感染（傷の周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿をもつ等の異常がある）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 5) 本品の使用中に皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 6) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼り替えること。
- 7) パッドサイズより大きな傷には使用しないこと。

2.その他の注意

- **1) 個包装紙に天然ゴムラテックスを使用している（フリーサイズを除く）。
- 2) 開封後、直ちに使用すること。
 - 3) 貼る際は、テープ部分をよく圧着し、なるべくシワが入らないようにすること。特に関節部位や屈曲部位に貼る場合は、シワが入りやすいので注意すること。
 - 4) はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。
 - 5) 貼り替えの際は同じ箇所に貼り続けず、テープを少しずらして使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

*, **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark