

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000

ガッチリバン™

再使用禁止


## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエステル・ポリウレタン編布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。

本品は滅菌済みである。

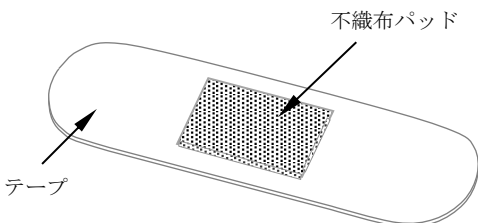

（ポリエステル・ポリウレタン編布基材）  
アクリル系粘着剤

	テープ	パッド
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm
Lサイズ	30mm×77mm	18mm×32mm

## 【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

## 【使用方法等】

- 1) 包装を開き、本品を取り出す。
- 2) 剥離紙をはがし、創部にパッドをあて、周りのテープ部をしっかりと押さえて皮膚に密着させる。

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- 1) 創部が汚れている場合は、創部及びその周辺の皮膚をよく洗浄し、水気がある場合にはふきとってから使用すること。
- 2) テープを伸ばさずに貼ること。
- 3) 本品の使用中に、創部に感染（傷の周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿をもつ等の異常がある）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 4) 本品の使用中に皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 5) 本品の使用中に、汚れた場合や、血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼り替えること。
- 6) パッドサイズより大きな傷には使用しないこと。
- 7) 過去にテープ貼付による皮膚障害が生じた部位への使用は控えること。

## 2. その他の注意

- \*1) 個包装紙に天然ゴムラテックスを使用している。
- 2) 開封後、直ちに使用すること。
  - 3) 貼る際は、テープ部分をよく圧着し、なるべくシワが入らないようにすること。特に関節部位に貼る場合は、シワが入りやすいので注意すること。
  - 4) はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。
  - 5) 粘着剤が皮膚に残った場合は、はがしたテープの粘着面に付着させるようにして取るか、ワセリンやハンドクリーム等を粘着剤になじませて取るとよい。
  - 6) 貼り替えの際は同じ箇所に貼り続けず、テープを少しずらして使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）。

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問合せ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark