

医療用品 (4) 整形用品  
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 (救急絆創膏)

JMDNコード 70444000 (34864000)

**カテリープ™ FSタブ**

CATHEREEP™ FS TAB

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、透明ポリウレタンフィルム基材にアクリル系粘着剤を塗布したカテーテル被覆・保護材 (救急絆創膏) である。

本品は滅菌済みである。

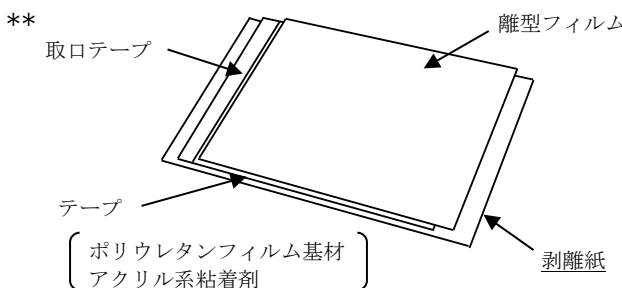

品番	サイズ
No.0405	45mm×50mm

**2.その他の注意**

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
- 2) 使用後に本品を剥がす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。
- 3) 本品には取口テープがあり、皮膚から剥がしやすくなっているため、抜管行為のおそれがある患者等への使用の際は注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示 (自己認証データによる)

**\*, \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00 (土・日・祝日を除く)

**【使用目的又は効果】**

**1.カテーテル固定用途**

注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

**2.救急絆創膏用途**

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

**【使用方法等】**

**1.貼るとき**

- 1) 包装を開き、本品を取り出す。
- 2) 剥離紙をゆっくり剥がす。
- 3) 取口テープ又は離型フィルムの端部 (非粘着部) をつかみ、粘着面を所定の位置 (又は創部) にあてて貼付する。
- 4) 離型フィルムの上から押さえつける。
- 5) 離型フィルムの端部をつまんでゆっくり剥がす。

**2.剥がすとき**

- 1) 取口テープをつまんでゆっくり剥がす。

**【使用上の注意】**

**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害 (発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等) と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

TM: trademark