

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材（救急絆創膏）

JMDNコード 70444000（34864000）

## カテリープラス™ CATHEREEPLUS™

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性のある透明ポリウレタンフィルム基材にウレタン系粘着剤を塗布した、カテーテル被覆・保護材（救急絆創膏）である。

本品は滅菌済みである。

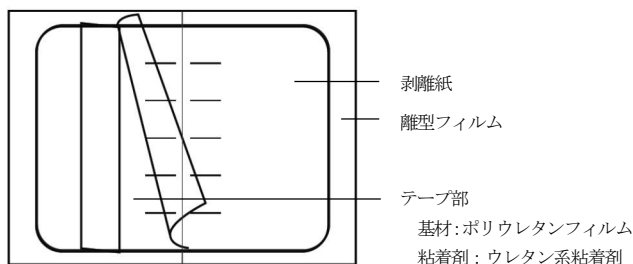

品番	サイズ
CPS0203	25mm×30mm
CPS0405	40mm×50mm
CPS0608	60mm×80mm
CPS0811	85mm×110mm
CPS1114	110mm×140mm
CPS1820	180mm×200mm

### 【使用目的又は効果】

#### 1.カテーテル固定用途

注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

#### 2.救急絆創膏用途

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

### 【使用方法等】

- 滅菌袋を開き、本品を取り出す。
- 大きい方の剥離紙をゆっくりはがす。
- 端部をつかみ、粘着面を所定の位置に当てて貼り付ける。
- 残った剥離紙をはがし、はがれや浮きが生じないように粘着面全体をしっかりと密着させて貼る。
- 離型フィルムをゆっくりとはがす。

※カテーテル固定に使用する場合は、必要に応じてサージカルテープ等でカテーテルをしっかりと固定する。

### 【使用上の注意】

#### 1.重要な基本的注意

※本品の使用中に貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

#### 2.その他の注意

- 開封後は、ただちに使用すること。
- 使用後に本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

### ※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark