

## カテリープラス™カーブのはがし方



テープの端を水平方向に引っ張りながら  
ゆっくりとはがすか、テープを折り返して  
ゆっくりとはがしてください

### \Point /

- ・テープをゆっくりとはがすことで皮ふを傷めにくいです
- ・はがれにくい場合は、はく離剤を使用してください



## 使用上の注意

- 滅菌していない製品のため、傷のある部位や、穿刺部には貼らないでください。
- 感染している部位、出血がある部位、皮ふ障害がある部位には貼らないでください。
- 皮ふや面板に水分が残っているとテープがはがれる原因となるため、テープを貼る前に皮ふや面板をよく拭き、清潔で乾いた状態にしてください。
- 使用中に貼付部位に感染または皮ふ障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、医師または看護師に相談してください。
- シャワー、入浴の際は、必ず事前に水が入らないように全面に密着していることを確認してください。
- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で遮光保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ストーマ装具の交換時に、カテリープラス™カーブも交換してください。テープがはがれてきた場合は、新しいテープに貼り替えてください。

### 皮ふ障害とは

発疹・発赤  
水ぶくれ  
皮ふはがれ  
かゆみ等

NICHIBAN

ストーマ面板の外周保護、皮ふの被覆・保護に

# カテリープラス™ カーブ

使い方ガイドブック

### 規格

品番	サイズ	1個	標準価格	JANコード
CPSC0412	39mm×127mm	30枚 (3枚×10シート)	1,500円 (税込1,650円)	4987167096656

TM:Trademark

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町 5-1  
<https://www.nichiban.co.jp/>

お問合せ先 | ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218 受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

日本製  
MADE IN JAPAN

SEN21N1GSC

# あんしん・かいてきな毎日のために カテリープラス™のやさしさを


カテリープラス™カーブは、  
ストーマ面板の外周保護、皮ふの被覆・保護に特化した  
防水性のフィルムドレッシングです

## カテリープラス™カーブの特長

### しっかり貼れてあんしん


簡単に切り離せてそのまま貼れるので使いやすいです  
様々な形状の面板にしっかりフィットします

\Point /  
あらかじめ  
カットされているので  
手間がかかりません。

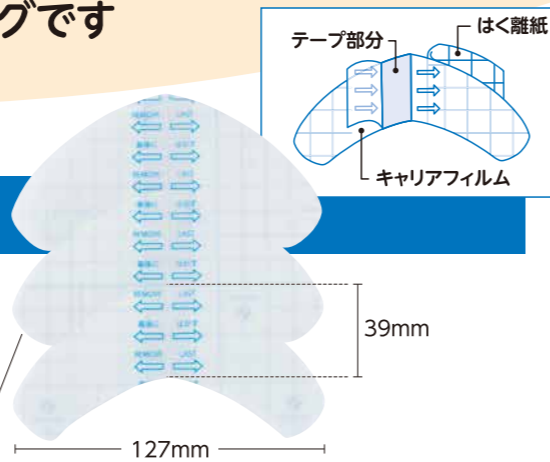


### かいてきな着けごち

薄く、しなやかな素材のため違和感が少なく、  
かいてきな着けごちです  
高透湿でムレにくいウレタンジェル粘着剤を  
採用しています

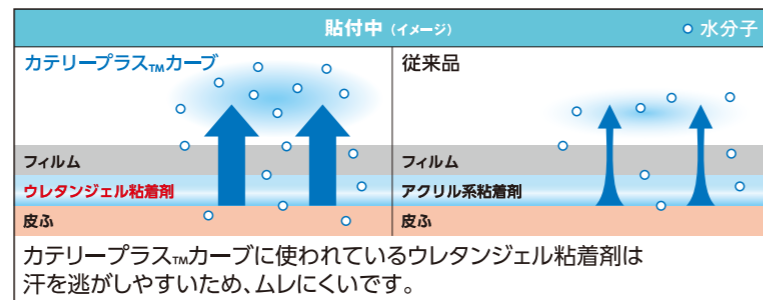

### 肌にやさしく、ぴったりフィット

はがすときの皮ふへのダメージを抑えました  
伸縮性のある防水フィルムが体の動きに追従します

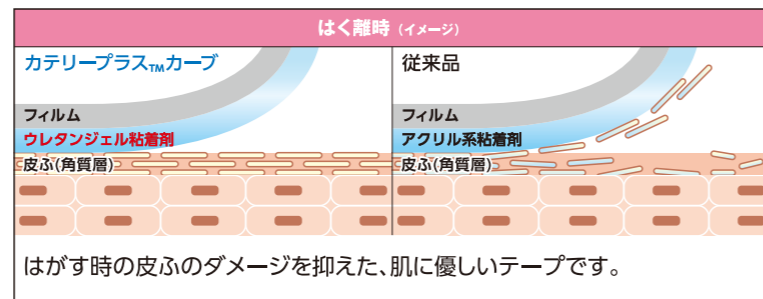


## カテリープラス™カーブ 使用・金額のめやす



1枚使用した場合の費用 50円



3枚使用した場合の費用 150円

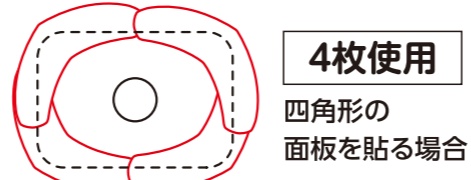

4枚使用した場合の費用 200円

\*価格は全て税抜価格です

\*ストーマ装具の交換時に、カテリープラス™カーブも交換してください。テープがはがれてきた場合は、新しいテープに貼り替えてください。

## カテリープラス™カーブの貼り方



1枚ずつ切り離します



裏面の小さい方ははく離紙のみをはがします




フランジのカーブ部分に合わせてテープを貼ります



残りのはく離紙をゆっくりはがし、  
キャリアフィルムの上からしっかりと押さえます



キャリアフィルムをゆっくりはがします

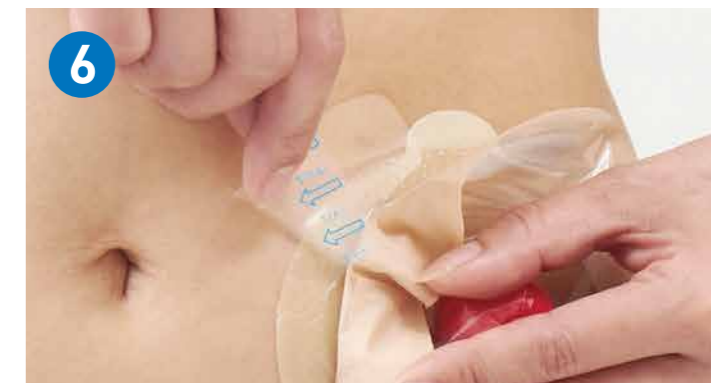

残りのキャリアフィルムもゆっくりはがします



貼り終わったら、しっかりと皮ふになじませます



2枚以上使用する場合は、テープの端を重ねるように  
貼るとはがれにくくなります

貼り方の動画は裏面のQRコードよりご確認ください。