

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材
JMDN コード 70444000
カテリープラス™ I.V.
CATHEREEPLUS™ I.V.

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性透明ポリウレタンフィルム基材にウレタン系粘着剤を塗布した外層テープと、伸縮性ポリウレタン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した内層テープとを貼り合わせたカテーテル被覆・保護材である。中央部には、刺入部位の観察を容易にする透明な窓がついている。

また、ポリプロピレン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した、独立するカテーテル固定用テープを付属している。

本品は滅菌済みである。

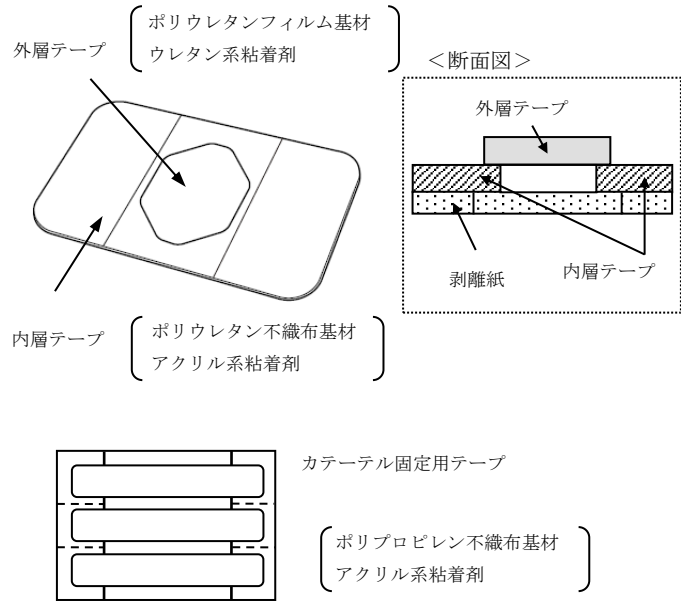

品番	サイズ		カテーテル 固定用テープ
	全体	観察部	
IV0608	60mm×80mm	39mm×34mm	15mm×80mm
IV0811	80mm×110mm	51mm×44mm	

【使用目的又は効果】

注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

【使用方法等】

- 1) 包装を開き、本品を取り出す。
- 2) 中央の大きい剥離紙をゆっくり剥がす。
- 3) 端部をつかんで窓の位置を刺入部位にあわせ、貼付する。
- 4) 端部の剥離紙を剥がし、密着させて貼付する。
- 5) 必要に応じて付属のカテーテル固定用テープでカテーテルを固定する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1) 貼付前に刺入部位の周囲を清潔にし、乾いた状態にすること。
- 2) 目的に合わせて適切なサイズを選択すること。
- 3) 皮膚障害や剥がれの原因となるため、本品を引っ張って伸ばした状態で貼付しないこと。
- 4) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 5) 使用中は、カテーテルの固定性やテープの剥がれ等について十分観察し、必要に応じて固定を補強するか、本品を交換すること。
- 6) シャワー浴等では、刺入部位に水が入らないよう注意すること。刺入部位に水が入った場合は、本品を交換すること。
- 7) 除去の際にはカテーテルや他の器具を抜去しないように、カテーテルや皮膚を押さえながら注意して剥がすこと。

2.その他の注意

- 1) 開封後、直ちに使用すること。
- 2) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

*, **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問い合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark