

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材
JMDN コード 70444000

カテリープラスTMI.V.スリット 小児用

CATHEREEPLUSTM I.V. SLIT FOR PEDIATRICS

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性透明ポリウレタンフィルム基材にウレタン系粘着剤を塗布した外層テープと、ポリウレタン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した内層テープを貼り合わせたカテーテル被覆・保護材である。

また、綿織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した、独立するカテーテル固定用テープを3枚付属している。

本品は滅菌済みである。

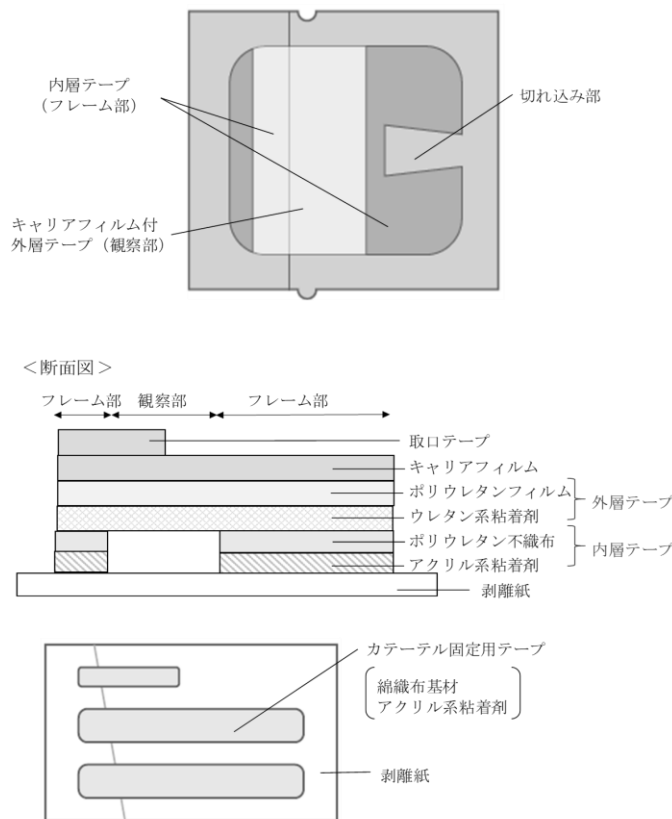

品番	本体		カテーテル 固定用テープ
	全体	観察部	
IVS0505	45 mm×51 mm	45 mm×25 mm	5 mm×35 mm ; 1枚 12 mm×65 mm ; 2枚

【使用目的又は効果】

注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

【使用方法等】

1.使用方法

- 1) 包装を開き、本品を取り出す。
- 2) カテーテル固定用テープをカテーテルハブ部とコネクタ部に1枚ずつ貼付する。
- 3) 切れ込み部側の剥離紙をゆっくり剥がす。
- 4) 残った剥離紙をつかみ、カテーテルのコネクタ部を切れ込み部に合わせ、カテーテル刺入部が観察部にくるように貼付する。
- 5) 残った剥離紙を剥がす。
- 6) しっかり押さえた後、透明のキャリアフィルムをゆっくり剥がす。
- 7) 残りのカテーテル固定用テープは切れ込み部分のカテーテルの補強やカテーテルのルート等の固定に適宜使用する。

2.除去方法

- 1) 本品を切れ込み部側から剥がし、そこから観察部の方向にゆっくりと剥がす。
- 2) カテーテル固定用テープをゆっくりと剥がす。
- 3) 除去の際にはカテーテルや他の器具を抜去しないように、カテーテルや皮膚を押さえながら注意して剥がす。
- 4) 剥がれにくい場合や粘着剤が皮膚に残った場合は、医療用剥離剤等を使用する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1) 貼付前に刺入部位の周囲を清潔にし、乾いた状態にすること。
- 2) 皮膚障害や剥がれの原因となるため、本品を引っ張って伸ばした状態で貼付しないこと。
- 3) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 4) 使用中は、カテーテルの固定性やテープの剥がれ等について十分観察し、必要に応じて固定を補強するか、本品を交換すること。
- 5) シャワー浴等では、刺入部位に水が入らないよう注意すること。刺入部位に水が入った場合は、本品を交換すること。

2.その他の注意

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
- 2) 本品を剥がす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

TM: trademark