

ニチバン
カテリープラス エコー
CATHEREEPLUS™ ECHO



エコーガイド下穿刺を清潔にサポート

～穿刺位置の確認から穿刺、固定までを一連の流れで行えます～


Aライン使用例【CPSE0608】



カテーテル固定用テープ

本体

末梢静脈使用例【CPSE0810】

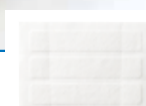

カテーテル固定用テープ


本体

カテリープラス™エコーのPOINT

高いエコー透過性


ウレタンジェル粘着剤が皮膚に密着するため、エコーの透過性が高く、キャリアフィルムの上からでも血管が確認できます。

ウレタンジェル粘着剤

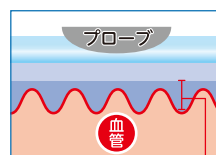

皮膚へしっかりとなじみ
良好なエコー透過性が
得られます

アクリル粘着剤

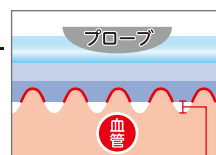

粘着剤と皮膚の間に空気
の隙間ができてしまうため
エコー透過性が低下します

穿刺部の清潔保持

キャリアフィルムの上でエコーを操作するため、エコープローブとエコーゼリーが穿刺部に触れません。



※Aライン使用例

エコーゼリーを簡単除去

使用したエコーゼリーは、キャリアフィルムをはがすときに一緒に除去されるため、ふき取る手間がありません。



※Aライン使用例

使用目的又は効果

注射針又はカテーテル挿入部位に直接貼付してその固定に用いてください。

使用上の注意

- 貼付前に挿入部位の周囲を清潔にし、乾いた状態にしてください。
- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 皮膚障害やはがれの原因となるため、本品を引っ張って伸ばした状態で貼付しないでください。
- 一度はがれたキャリアフィルムを再度貼り合わせると、気泡が入りエコー透過性が損なわれるので、新しいものを使用してください。
- 観察部にシワ・気泡が入った状態では、エコー透過性が損なわれるため、貼付する際に、テープ部分を手でよく圧着し、シワ・気泡が入らないようにしてください。
- 十分な固定力を確保するため、カテーテル固定用テープを使用してください。
- 本品の除去の際には、カテーテル等を抜かないように、カテーテルや皮膚を押さえながら注意してはがしてください。
- 皮膚障害が疑われる部位には、使用しないでください。
- 開封後は、直ちに使用してください。
- 使用後に本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
- 再使用はしないでください。

規格【カテリープラス™エコー】

品番	サイズ			1箱	標準価格 (税別)	JANコード
	テープ部	観察部	カテーテル固定用テープ			
CPSE0608	60mm×75mm	50mm×40mm	10mm×50mm×1枚 15mm×80mm×2枚	50枚	11,000円	4987167102197
CPSE0810	80mm×100mm	60mm×55mm	15mm×80mm×3枚	50枚	12,000円	4987167098766

一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 医療機器届出番号 13B2X00218222201

TM:trademark



Aライン

貼り方の動画は
こちら▼



末梢

貼り方の動画は
こちら▼

