

医療用品（４）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDN コード 34864000


カテリーパッド™ マイルド
CATHERIPAD™ MILD

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリプロピレン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる創傷被覆保護用ドレッシング材である。
本品は滅菌済みである。

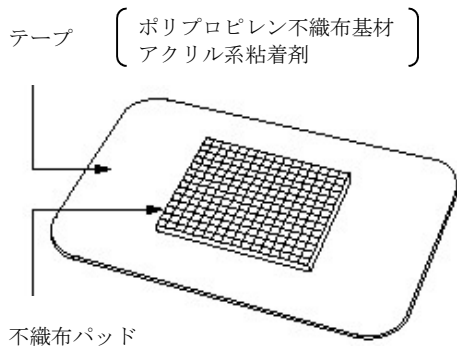

品番	サイズ	
	粘着部	パッド部
No.0508	50mm×80mm	25mm×50mm
No.0610	60mm×100mm	30mm×65mm
No.0812	80mm×120mm	40mm×80mm
No.1212	120mm×120mm	80mm×80mm
No.0915	90mm×150mm	50mm×100mm
No.0921	90mm×210mm	50mm×160mm
No.0927	90mm×270mm	50mm×210mm
No.0933	90mm×330mm	50mm×280mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッドをあてて周りのテープで固定する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ＊ 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2.その他の注意

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
2) 使用後に本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。
使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕
ニチバン株式会社
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

〔お問い合わせ窓口〕
ニチバン株式会社 お客様相談室
TEL 0120-377-218
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark