

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

オーキューバンエコ™


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエチレンフィルム基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。
本品は滅菌済みである。

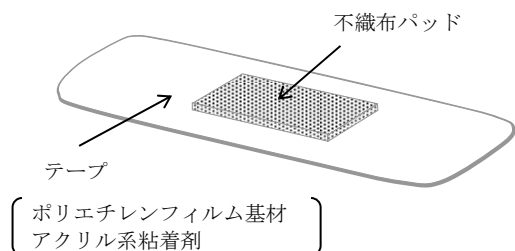

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】
ニチバン株式会社

【お問い合わせ窓口】

ニチバン株式会社 お客様相談室
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TEL 03-5978-5622

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TMは商標です。

	テープ	パッド
Sサイズ	12mm×55mm	7.5mm×17mm
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm
Lサイズ	30mm×72mm	22mm×29mm
Pサイズ	38mm×38mm	18mm×18mm
フリーサイズ	76mm×250mm	30mm×250mm
* キャラクター(円型)	直径30mm	13mm×13mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッドをあてて周りのテープを伸ばさずに貼付する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ※1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。

2.その他の注意

- 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 2) 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。