



体圧分散に



熱傷・創傷後のケロイド対策に



体圧分散や熱傷・創傷後の肥厚性瘢痕、ケロイドの対策に

■ 適度なクッション性

ポリウレタン発泡体のクッション性により、局所へかかる体圧を分散します

■ 粘着剤をパターン塗工

粘着部と非粘着部を交互に設けることで、皮膚のムレやかぶれを軽減します

使用方法


- ・エラストン™を必要な形状に切り、ケロイド上、またはケロイドの発生を予防したい身体の部位に貼ります。その上からテープを貼り、連続的に圧迫固定をします。
- ・皮膚刺激を軽減するために、1日に30分から60分間貼らない時間をとってください。
- ・かぶれやすい人は、エラストン™の粘着剤のついていない面をあてて、同様に圧迫します。

<規格> エラストン™


| 品番 | 厚さ | サイズ | 1箱 | 標準価格 (税別) | JANコード |
|--------|--------|-------------|-----|--------------|---------------|
| ELT125 | 12.5mm | 300mm×200mm | 10枚 | 6,330円 | 4987167005191 |
| ELT250 | 25mm | 300mm×200mm | 5枚 | 5,410円 | 4987167005207 |

TM: trademark

<粘着剤塗工面拡大図>

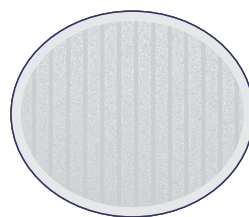

ハサミで
簡単にカット

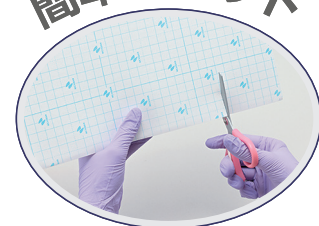

使用上の注意

- ・傷口には直接貼らず、滅菌パッドやドレッシング材をあてた上から貼ってご使用ください。
- ・使用中、発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- ・はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

保管上の注意

高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。
※ポリウレタン発泡体はきわめて短期に黄変する性質がありますが、クッション性が損なわれない限り使用できます。

 **日本製**
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>