




体圧分散に

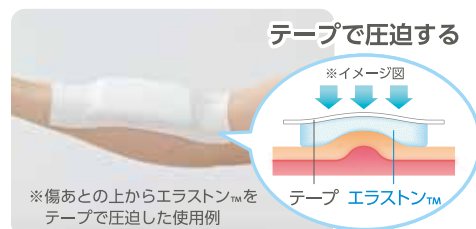

熱傷・創傷後のケロイド対策に



体圧分散や熱傷・創傷後の肥厚性瘢痕、ケロイドの対策に


■ 適度なクッション性

ポリウレタン発泡体のクッション性により、局所へかかる体圧を分散します

■ 粘着剤をパターン塗工

粘着部と非粘着部を交互に設けることで、皮膚のムレやかぶれを軽減します

〈粘着剤塗工面拡大図〉

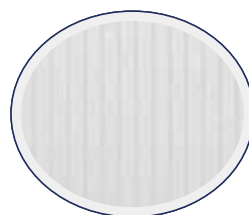

ハサミで
簡単にカット



使用方法

- ・エラストンTMを必要な形状に切り、ケロイド上、またはケロイドの発生を予防したい身体の部位に貼ります。その上からテープを貼り、連続的に圧迫固定をします。
- ・皮膚刺激を軽減するために、1日に30分から60分間貼らない時間をとってください。
- ・かぶれやすい人は、エラストンTMの粘着剤のついていない面をあてて、同様に圧迫します。

＜規格＞ エラストンTM

品番	厚さ	サイズ	1箱	標準価格 (税別)	JANコード
ELT125	12.5mm	300mm×200mm	10枚	6,330円	4987167005191
ELT250	25mm	300mm×200mm	5枚	5,410円	4987167005207

TM: trademark

使用上の注意

- ・傷口には直接貼らず、滅菌パッドやドレッシング材をあてた上から貼ってご使用ください。
- ・使用中、発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- ・はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

保管上の注意

高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。
※ポリウレタン発泡体はきわめて短期に黄変する性質がありますが、クッション性が損なわれない限り使用できます。

 **日本製**
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町 5-1

ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

SEN2561 CGP