

SURGICAL REMOVER OIL

サージカルのり落とし

粘着剤汚れ除去剤

医療現場の声から生まれました！

■用途

皮膚についた医療用テープの粘着剤や汚れの除去。

■アルコールフリー・無臭性

肌にやさしく、ベンジンのような臭い也没有。

■肌にやさしい

安全性の確認された原料で作りました。

■拭き取りタイプ

洗い流さなくていいから、簡単・便利。

■ポンプ式容器

使いやすくて衛生的。

■ハンディサイズ

約120回も使えるのに、片手で持ちやすく、包交車にものせやすい。

■規格

品番	内容量
SR100	100mL



(実物大)



医家向品

テープメーカーが考えた
皮膚にやさしい、のり落とし剤です。


SURGICAL REMOVER OIL

サージカルのり落とし

粘着剤汚れ除去剤

優れた除去性能

肌にやさしいのに、拭き取り回数はベビーオイルの約 $\frac{2}{3}$!

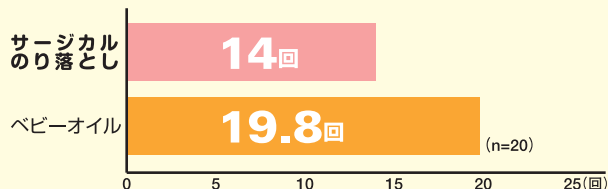

前腕部の皮ふに作製したのり残りを、それぞれの製品を十分しみ込ませたガーゼで拭き取り、完全に除去できるまでの回数(往復)を数えました。

肌にやさしい

優れた除去性能を持ちながらも、高い安全性の設計です。

試験内容	試験結果
(動物) 皮ふ一次刺激性試験*	弱い刺激物
(動物) 皮ふ感作性試験	感作性なし
(ヒト) パッチテスト	安全品

*皮ふ一次刺激性結果は、「弱い刺激物」「中等度刺激物」「強い刺激物」の3つの判定に分類されます。

ご要望に応えた品質


ベンジンの不満を改善、医療現場の声に応えました。

ベンジンを使っていますが、
臭いが気になります…
患者さんが痛がります…
かぶれやすい…
毒性もあり、やめたい…

ベンジンの毒性

- ・ヒト吸入推定致死量：3%・5分または約4ml
 - ・中毒学的薬理作用：中枢神経抑制作用
- 出典：(財)日本中毒情報センターより


ベンジンの不満点は？
ベンジンをご使用の病院でのアンケート結果より

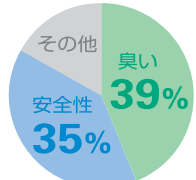


安心の天然保湿成分配合

テープの貼りかえが多いお肌にもやさしい、天然保湿(エモリエント)成分「マカデミアナッツ油」を配合しています。

マカデミアナッツ油は、マカデミアの実から抽出された肌になじみがよい液体油です。肌を乾燥から守るので、乳液やクリームなどの化粧品によく使われています。

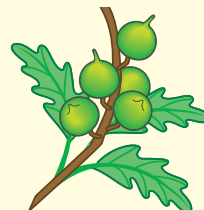

■ 使用法

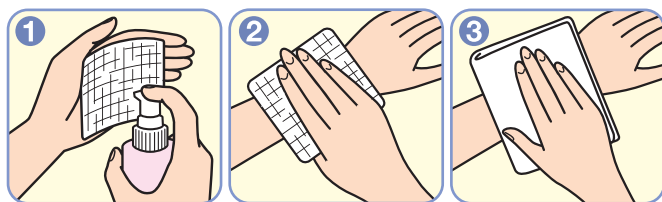

1 本品をガーゼ等に適量とってください。

2 のり残りや汚れとゆっくりにじませながら、やさしく拭き取ってください。

3 ベタつきが気になる場合には、温タオルなどで清拭してください。

【頑固なりのり残りの除去方法】

ガーゼ等に本品を十分含ませ、のり残りや汚れの上にしばらく置いてバックしておくと、拭き取りやすくなります。

■ 使用上の注意

- 勢いよくプッシュすると、液が飛び散る場合がありますのでご注意ください。
- 本品が付着して困る場所は、あらかじめタオルなどで必ず保護してください。
- 傷・湿疹などお肌に異常がある場合は、使用しないでください。
- 赤み、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは、直ちに使用を中止してください。
- 目に入らないように注意し、目に入ったときは、こすらずにすぐ洗い流してください。
- 一度出した液は、容器に戻さないでください。
- 本品を使用後、再度テープを貼る場合は、粘着力が弱くなることがありますので、温タオルなどで十分にベタつきを拭き取ってから貼ってください。

■ 保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で立てた状態で保管してください。

●このパンフレットは古紙配合率100%の再生紙を使用しております。

re100

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

●ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>