

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ニチバングループはSDGs(持続可能な開発目標)の達成のために、
さまざまな取り組みを推進しています。
粘着技術を基に、快適で健康な生活に貢献しながら、
ゴール目標とターゲットに取り組んでまいります。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2丁目3番3号 国内事業本部 医療材営業統括部
<https://www.nichiban.co.jp/>

お客様相談室	〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (0120) 377-218	FAX (03) 5229-2330
札幌オフィス	〒060-0003 札幌市中央区北3条西2-2-1 NX札幌ビル	TEL (011) 231-2310	FAX (011) 231-2387
仙台オフィス	〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル	TEL (022) 390-0220	FAX (022) 390-0221
東京オフィス	〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (03) 5229-7524	FAX (03) 5229-2330
名古屋オフィス	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-16-4 BPRプレイス名古屋丸の内	TEL (052) 229-1766	FAX (052) 201-1811
大阪オフィス	〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル	TEL (06) 4803-2311	FAX (06) 4803-2300
広島オフィス	〒730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル	TEL (082) 205-5392	FAX (082) 205-5393
福岡オフィス	〒810-0011 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル	TEL (092) 521-1171	FAX (092) 521-1180

ぴったり技術で明日をつくる



患者様と医療を結ぶ絆をかたちに

感染対策製品のご案内

お悩み1 止血ベルトを衛生的に使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 止血ベルトの使いまわしが気になる
- ☒ 患者さん自身で圧迫することが難しい
- ☒ 止血ベルトの滅菌・消毒に手間がかかる
- ☒ 粘着テープによるかぶれが気になる

解決！ 自着性伸縮包帯 バトルウィン™ くっつくバンデージ™



品番	略称	サイズ	1箱	JANコード
KB38	KB38	38mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167064228
KB50	KB50	50mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167057992
KB75	KB75	75mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167058005
KB38L	KB38L	38mm×8m〈伸長時〉	12巻	4987167074999
KB50L	KB50L	50mm×8m〈伸長時〉	12巻	4987167075002

〔基 材〕綿・ポリウレタン繊維 〔自着剤〕ゴム系(天然ゴム・脱タンパク)

① ディスポーザブルで衛生的

穿刺部に止血絆創膏を貼った上から、1周半～2周重ねて巻きます。適度な圧迫力があり、ディスポーザブルの止血ベルトとしてお使いいただけます。手で簡単に切れます。

② 皮膚にくっつかない為、かぶれの心配が少ない

包帯同士を重ねて巻くだけで簡単にくっつきます。皮膚にはつかないため、どなたでも安心してお使いいただけます。



＜使用方法＞
動画で分かりやすく
説明しています！

＜使用方法＞



01 約1周半～2周程度巻きます。引っ張りすぎないように注意してください。



02 手で切ります。



03 外れないように端をしっかりと密着させ、完成です。



POINT
引っ張る長さは、約1～2cm(指が1本入る程度)を目安にしてください。
端を内側に織り込んで入れると外れにくくなります。

くっつくバンデージ™は脱タンパク天然ゴムラテックスを使用しています

ラテックスアレルギーとは、天然ゴムに含まれるラテックスタンパク質がアレルゲンとなって、アレルギーを引き起こすものです。症状としては、赤み、かゆみ、じんましんなどの皮膚障害が発現し、まれに呼吸困難、血圧低下や意識障害などのアナフィラキシーショックを引き起こすことが特徴です。くっつくバンデージ™は一般的な天然ゴム製品と比べ、タンパク質量を約1/50以下に低減し、天然ゴム由来のアレルギーが生じる確率を低くしています。(重篤なアレルギー患者は除く)

TM:trademark

標準採血法
ガイドライン
GP4-A3

止 血

皮下血腫・止血困難

患者自身で圧迫止血できない場合や止血が不十分になる場合を考慮し、止血用のベルトを使用するのも一法である。その場合、ベルトは使い捨てとする。

(予防)通常の患者では採血後5分程度、穿刺部位を圧迫する。必要に応じ止血ベルト等を用いる。抗凝固薬を服用している場合など、止血に時間がかかると予測される場合は、確実に止血するまで圧迫を続ける。

お悩み2 しっかりと圧迫したい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 血液が漏れて患者さんの衣服が汚れてしまうことがある
- ☒ ガーゼとテープによる圧迫は手間がかかる
- ☒ 患者さん自身で圧迫することが難しい

解決！ 圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材) ステップティ™



ステップティ™ NO.80 白タイプ

品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部(6mm厚)		
No.80	STP80	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987167036218

ステップティ™ NO.80A ベージュタイプ

品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部(6mm厚)		
No.80A	STP80A	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987167036225

テープ部	パッド部
〔基 材〕ポリウレタン不織布 〔粘着剤〕アクリル系	〔基 材〕ポリエステル・セルロース・レーヨン不織布

△ 使用上の注意

- ※ はがした時に必ず止血ができていないことを確認してください。
- ※ 皮膚刺激を防ぐため、2時間以内にはがしてください。

① 厚さ6mmのパッド

厚さ6mmのパッドでしっかりと圧迫し、血液を吸収します。

② 楕円形のパッドでしっかりと圧迫

楕円形のパッドが、皮膚穿刺部と血管穿刺部の2点をカバーし、しっかりと圧迫止血ができます。



＜使用方法＞
動画で分かりやすく
説明しています！

《警告》

本品は、末梢静脈の止血・被覆保護を目的としたものであり、末梢静脈以外の部位には使用しないでください。
[末梢静脈以外に使用した場合、当該製品としての機能を果たすことができず、止血不全や空気塞栓等を起こす可能性があります。]

＜使用方法＞



01 針またはカテーテルの血管刺入点
がパッドの中央になるようにパッド
をあてがい、軽く仮止めます。



02 当てたパッドに軽く親指をそえ、針
またはカテーテルを抜去すると同
時にパッドを強めに圧迫します。




03 △ テープの端は伸ばさなくて貼る
パッドがずれないように圧迫しながら、片側の
テープを1cm(親指の幅)程度引き伸ばしま
す。はく離紙をはがしながら、皮膚に貼ります。



04 △ テープの端は
伸ばさなくて貼る
③と同様に反対側を貼
ります。




05 完成です。

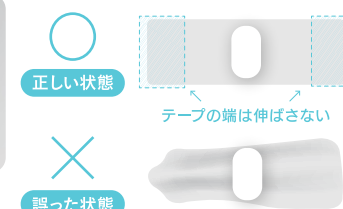

正しい状態
×
誤った状態

なぜテープの端を伸ばしてはいけないの？

皮膚表面に強い力が連続してかかると水ぶくれ(緊張性水泡)が生じる可能性があります。テープを強く引っ張って貼ると、テープが元に戻る力とテープの端部分に集中して加わるためです。皮膚トラブルを防ぐために、テープの端は伸ばさなくて貼りましょう。

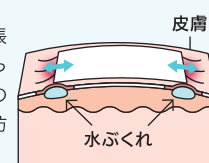

TM:trademark

標準採血法
ガイドライン
GP4-A3

ガーゼ、絆創膏およびテープ

止 血

採血部位の止血のために用いる。ガーゼは個別包装された滅菌済みのものを準備しておく。

通常、抜針後5分間程度穿刺部位を圧迫する。

お悩み3 / たくさん使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 採血、注射後にたくさん使いたい
- ☒ 子供が採血、注射を怖がってしまう

解決！ / 穿刺部被覆保護材 チューシャバン™



医療機器届出番号 13B2X00218131180
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

1 パッド面に触れず衛生的

パッド、粘着面に触れずに衛生的に貼ることができます。


2 ベージュ色で目立ちにくい

肌なじみの良い色のため、貼っていても目立ちにくいです。

<使用方法>



<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！

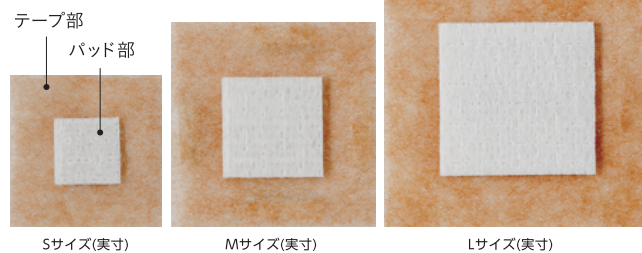

チューシャバン™		サイズ		1 箱	JAN コード
品番	略称	テープ部	パッド部		
Sサイズ	CSVs	20mm×20mm	8mm×8mm	1000 枚(10枚×100袋)	4987167029555
Mサイズ	CSVM	27mm×27mm	13mm×13mm	480 枚(8枚×60袋)	4987167029562
Lサイズ	CSVL	35mm×35mm	20mm×20mm	480 枚(6枚×80袋)	4987167029579
テープ部		パッド部			
〔基 材〕パルプ・ポリエステル不織布		〔粘着剤〕アクリル系		〔基 材〕セルロース系不織布	

△ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

お悩み4 / 衛生的に使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ ゴミ箱に血の付いたガーゼが捨てられていることがあり、衛生的ではない
- ☒ 1つ1つ個包装の絆創膏が欲しい
- ☒ 適度な厚みのあるパッドが欲しい

解決！ / 止血用パッド付絆創膏（創面保護材） インジェクションパッド マイルド



医療機器届出番号 13B2X00218131270
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

インジェクションパッド マイルド		サイズ		1 箱	JANコード
品番	略称	テープ部	パッド部		
No.30N	IJPM30N	30mmφ	10mmφ	100 枚	4987167058272
No.36N	IJPM36N	36mmφ	16mmφ	80 枚	4987167058289

テープ部 〔基 材〕ポリプロピレン不織布 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部 〔基 材〕セルロース系不織布
△ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

1 個包装で衛生的

一つ一つ個包装になっているため、患者さんごとに衛生的に貼ることができます。また、パッドに触れることなく貼れるように工夫がしてあるため、医療者の方や患者さんも安心して使うことができます。

2 皮膚にやさしい

透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により、皮膚の角質を保護し、はがす時の痛みも軽減しました。



<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！



<使用方法>



※ 使用方法はインジェクションパッドについても同じです。

解決！ / 救急絆創膏 オーキューバンエコ™ キャラクター



医療機器届出番号 13B2X00218131160
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！



オーキューバンエコ™ キャラクター		サイズ		1 箱	JANコード
品番	略称	テープ部	パッド部		
OQECs	OQECs	30mmφ	13mm×13mm	90 枚(キャラクター6種類：各15枚入)	4987167085452
テープ部		パッド部			
〔基 材〕ポリエチレンフィルム		〔粘着剤〕アクリル系		〔基 材〕レーヨン不織布+ポリエチレンネット	

サンリオの人気キャラクター6種類入り

採血、注射を嫌がるお子様のごほうびに。

TM:trademark

解決！ / 止血用パッド付絆創膏（創面保護材） インジェクションパッド



医療機器届出番号 13B2X00218131100
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000



※ 実寸ではありません。

インジェクションパッド 白タイプ		サイズ		1 箱	JANコード
品番	略称	テープ部	パッド部		
No.30	IJP30	30mmφ	10mmφ	120 枚	4987167010638
No.36	IJP36	36mmφ	16mmφ	100 枚	4987167010645

インジェクションパッド ベージュタイプ		サイズ		1 箱	JANコード
品番	略称	テープ部	パッド部		
No.30A	IJP30A	30mmφ	10mmφ	120 枚	4987167013226
No.36A	IJP36A	36mmφ	16mmφ	100 枚	4987167013233

テープ部 〔基 材〕パルプ・ポリエステル不織布 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部 〔基 材〕セルロース系不織布
※ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

個包装で衛生的

一つ一つ個包装になっているため、患者さんごとに衛生的に貼ることができます。また、パッドに触れることなく貼れるように工夫がしてあるため、医療者の方や患者さんも安心して使うことができます。

製品一覧表

品 名	品番	略称	サイズ		1 箱	JANコード	標準価格 (税別)	
			テープ部	パッド部				
くっつくバンデージ™	KB38	KB38	38mm×4m 〈伸長時〉		12巻	4987167064228	6,530円	
	KB50	KB50	50mm×4m 〈伸長時〉			4987167057992	7,560円	
	KB75	KB75	75mm×4m 〈伸長時〉			4987167058005	10,080円	
	KB38L	KB38L	38mm×8m 〈伸長時〉			4987167074999	13,000円	
	KB50L	KB50L	50mm×8m 〈伸長時〉			4987167075002	15,000円	
ステプティ™ NO.80 (白タイプ)	No.80	STP80	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987167036218	1,650円	
ステプティ™ NO.80A (ベージュタイプ)	No.80A	STP80A				4987167036225		
チューシャパン™	Sサイズ	CSVs	20mm×20mm	8mm×8mm	10枚×100袋	4987167029555	3,300円	
	Mサイズ	CSVm	27mm×27mm	13mm×13mm	8枚×60袋	4987167029562	3,000円	
	Lサイズ	CSVl	35mm×35mm	20mm×20mm	6枚×80袋	4987167029579	3,300円	
オーキューバンエコ™ キャラクター	OQECS	OQECS	30mmφ	13mm×13mm	90枚 (キャラクター6種×15枚)	4987167085452	1,320円	
インジェクションパッド マイルド	No.30N	IJPM30N	30mmφ	10mmφ	100枚	4987167058272	700円	
	No.36N	IJPM36N	36mmφ	16mmφ	80枚	4987167058289		
インジェクションパッド	No.30	IJP30	30mmφ	10mmφ	120枚	4987167010638	700円	
	No.36	IJP36	36mmφ	16mmφ	100枚	4987167010645		
	ベージュタイプ	No.30A	IJP30A	30mmφ	10mmφ	120枚	4987167013226	700円
		No.36A	IJP36A	36mmφ	16mmφ	100枚	4987167013233	