

取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 警告

### ● **本品は、必ず医師の指示に従って使用してください。**

誤った使用方法により、重篤な症状を引き起こす可能性があります。

重篤な症状とは ・おへそにキズができる ・おへそにできたキズから腸が脱出する  
・おへそにできたキズから細菌が入り、感染症を引き起こす

### ● **誤飲注意。お子様の手の届く所には置かないでください。**

製品の保管、および装着準備の際は、お子様が口に入れないよう充分注意してください。  
万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

- へそ圧迫以外の用途では使用しないでください。
- おへそや、おへそ周辺の皮ふにキズがある場合は使用しないでください。
- 生後1か月未満のお子様には使用しないでください。生後1ヶ月以降のお子様であっても、**本品の使用可能な時期は皮ふやおへその状態によって異なりますので、医師の指示に従って使用し始めてください。**

※ 低出生体重児(出生体重 2,500g 未満)や早産児(在胎 37 週未満)として生まれたお子様は、おへその皮ふが特に薄いため、使用し始める時期が早すぎる場合や誤った使用方法により重篤な症状を引き起こす可能性が高くなります。本品を使用し始める時期を必ず医師に確認し、充分注意して使用してください。

- 一度使用したテープおよびへそ圧迫材は、衛生上の理由、硬さ・形状の変化、部分的な破損等の恐れがありますので、再使用しないでください。




### 使用する前に医師へ相談すること

- 便秘やガスが溜まることによってお子様のお腹が張っている場合、本品の治療効果が得られないため、お腹の張りを改善する処置が必要です。本品を使用する際は、医師からお腹の張りへの処置方法の指示を受け、必ずお腹の張りに対処しながら使用してください。
- 生後6か月を過ぎたお子様では、本品を使用しても圧迫効果が得られない場合があります。使用については医師に相談してください。

### 使用中にこんな症状が出たら

- 本品の使用により次の症状が現れた場合は、**直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。**  
**おへそにキズができていて、またはおへそのキズから細菌が入り感染を引き起こしている**可能性があります。
  - ①おへそから膿や滲出液(体液)、血液が出ている、またはかさぶたがある
  - ②おへそや、おへそ周辺の皮ふの色が赤色や紫色、さらには白色に変わったまま元の色に戻らない
  - ③おへその皮ふがむくんでいるまた、その他にも異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。
- 本品を装着中、または取り外した後におへそや、おへそ周辺の皮ふが赤くなる場合や発疹が生じる場合があります。多くは一過性のもので時間とともに消失しますが、**これらの症状が悪化したり、治まらない場合には医師の診察を受けてください。**

## 内容物

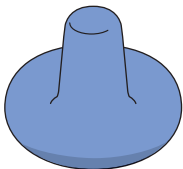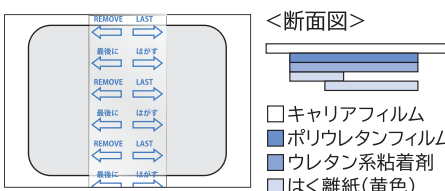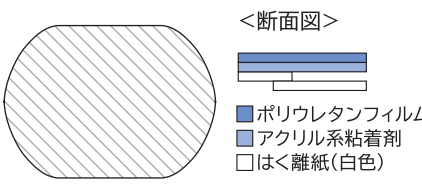名称	へそ圧迫材	テープA(固定テープ)	テープB(補強テープ)
入り数	3個	4枚※	4枚※
外観 材質	 ポリウレタン発泡体(青色)	 ＜断面図＞ □ キャリアフィルム ■ ポリウレタンフィルム ■ ウレタン系粘着剤 ■ はく離紙(黄色)	 ＜断面図＞ ■ ポリウレタンフィルム ■ アクリル系粘着剤 □ はく離紙(白色)
サイズ	直径 25mm	60mm×80mm	50mm×70mm
役割	● おへそに差し込み、飛び出したおへそを正しい位置に保持します。	● へそ圧迫材の位置を固定します。 ● 防水効果があり、入浴時、おへそへの浸水を防ぎます。	● テープAの上から貼り、固定力を高めます。

※1枚は、貼り損ない時の予備としてご使用ください。

## 使用する前に確認すること

- おへそや、おへそ周辺の皮ふにキズがないことを確認してください。キズがある場合はキズが治ってから使用してください。

## へそ圧迫材を押し込む時の注意


- へそ圧迫材がおへその中央に装着されていない場合、腸閉塞等の重篤な病気を引き起こす可能性がありますので、**必ずおへその中央を押し込んでください。**
- へそ圧迫材の押し込みが弱い場合、治療効果が得られないため、へそ圧迫材の表面と皮ふが平らになるように押し込んでください。

## テープを貼る時の注意

- 必ず「テープA」を皮ふに貼ってください。「**テープB**」は粘着力が強い**ため、直接皮ふには貼らないでください。**
- テープは引っ張って貼らないでください。皮ふトラブル(かゆみ、発疹・発赤、水疱、皮ふはく離等)やはがれの原因となります。
- テープのはがれや入浴時の浸水を防ぐため、テープの浮きやシワが入らないように貼ってください。


## 使用方法

### テープAにへそ圧迫材を取り付ける

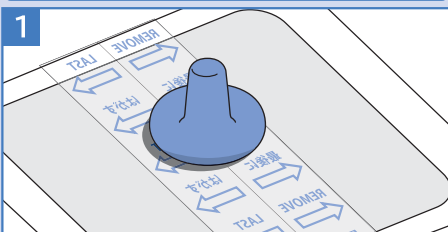


おへそとおへそ周辺の皮ふを石鹸でよく洗います。皮ふに汚れや水分がある場合、テープがはがれやすくなるため充分に乾かします。テープAのはく離紙(黄色)をはがし、粘着面の中心にへそ圧迫材を置きます。

### へそ孔の位置を確認する

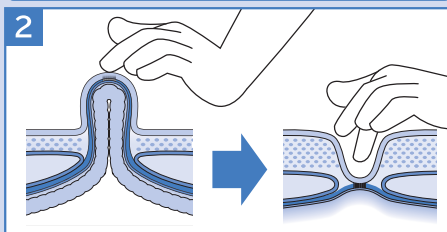


おへその中央を指で軽く押さえ、へそ孔の位置を確認します。

### おへそに圧迫材とテープAを装着する

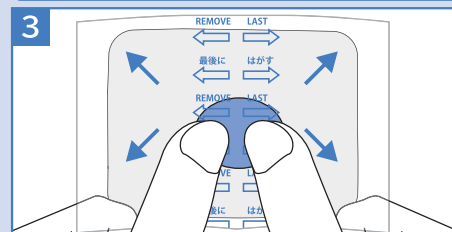


テープAの両端を両手で持ちながら、へそ圧迫材の先端をおへその中央に垂直に差し込むよう、親指で圧迫材を**しっかりと**押し込みます。また、テープAにシワが入らないように中央から外側に向けて貼ります。

### キャリアフィルムをはがす

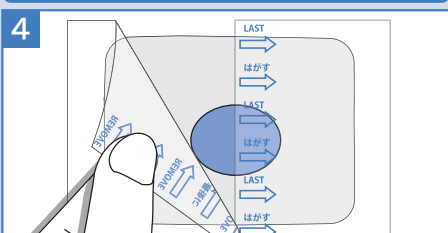


「最後にはがす」の表示がある硬いフィルムの上からテープAを圧着します。フィルムの矢印の向きに沿ってゆっくりとはがします。

### テープBを貼る

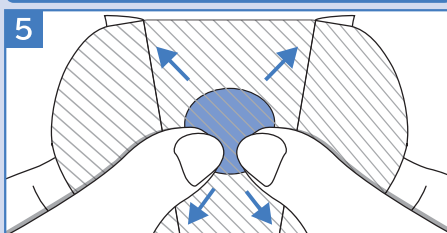

テープBのはく離紙(白色)を半分はがします。へそ圧迫材を親指で**しっかりと**押し込みながら、テープBをテープAからはみ出さないように重ねて貼ります。残りのはく離紙(白色)をはがし、テープBにシワが入らないように中央から外側に向けて貼ります。

### 完成

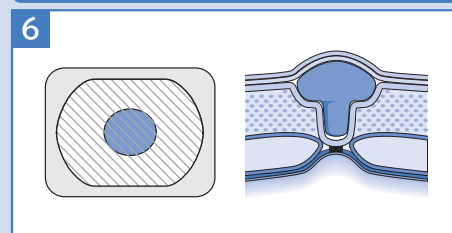

《 完成時に確認するポイント 》

- ☑ へそ圧迫材をおへその中央に垂直に押し込んでいる
- ☑ 皮ふとへそ圧迫材とテープの間にすき間がない

## テープをはがす時の注意

皮ふが伸びないように指で皮ふを押さえながらゆっくりとはがしてください

一気にテープをはがすと皮ふを傷めます



## テープ・圧迫材を交換する時の注意

- テープおよびへそ圧迫材は、5～7日を目安に新しいものに交換してください。
- 交換時にはおへそに変色、キズ、<sup>うみ</sup>膿、むくみ等がないことを確認してください。

## 保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光のあたる場所を避け、室温でお子様の手の届かないところに保管してください。