

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000
インジェクションパッド
INJECTION PAD


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、パルプ・ポリエステル不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる静脈注射、採血、予防注射、関節穿刺後の止血用ドレッシング材である。
本品は滅菌済みである。

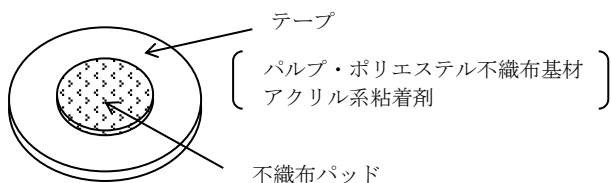

基材色：白色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.30	直径30mm	直径10mm
No.36	直径36mm	直径16mm

基材色：ベージュ色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.30A	直径30mm	直径10mm
No.36A	直径36mm	直径16mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドをあてて周りのテープで固定する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2.その他の注意

- **1) 個包装紙に天然ゴムラテックスを使用している。
- 2) 開封後は、直ちに使用すること。
 - 3) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

***, **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問い合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）