

インジェクションパッド

INJECTION PAD




一般医療機器 救急絆創膏 医療機器届出番号 13B2X00218131100 JMDNコード 34864000

**適度な圧迫効果がある止血用パッド付絆創膏です。
静脈注射、採血・予防接種後の被覆保護に
ご使用いただけます。**

パッド・粘着面に
触れることなく貼れる



透湿性がよい
粘着テープ

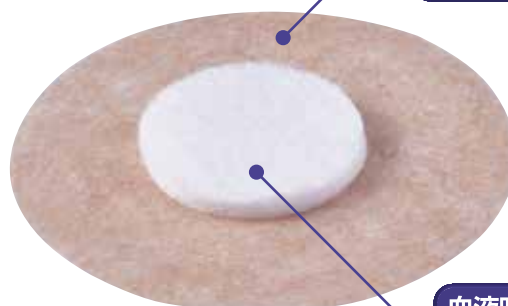

血液吸収性に優れた
不織布パッド

インジェクションパッド

INJECTION PAD



適度な圧迫効果

パッドは、血液吸収性に優れたセルロース系積層不織布を採用。適度な圧迫効果を生み、穿刺部をやさしく保護します。



衛生的に貼れる

個別(1枚ずつ)の滅菌包装で、パッド・粘着面に触れずに簡単に貼付できます。



白とベージュの2色タイプ

白色と目立たないベージュ色の2種類ございます。パッドの上から押さえやすい丸形状です。

用途

- 静脈注射・採血・予防接種後の被覆保護
- 関節穿刺後の被覆保護

禁忌

- 再使用禁止

※動脈留置針抜糸後の止血には使用しないでください。

使用法



① 個包装を開け口より開封し、テープの端にあるはく離紙とテープを持ち、台紙からはがします。



② 穿刺部にパッドをあて、テープ裏面にあるはく離紙をもったまま貼付します。




③ はく離紙をはがし、テープ全体をよく押さえ、貼付します。



④ はがす際は端をつまみ、皮膚からはがします。

構成

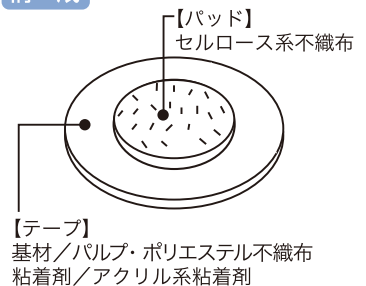

使用上の注意

- 本品の使用中に、創部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえてください。
- 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保存してください。

【実寸大】



No.30A



No.36

規格

	品番	サイズ		1箱	標準価格 (税別)	JANコード
		テープ部	パッド部			
白タイプ	No.30	30mmφ	10mmφ	120枚	700円	4987167010638
	No.36	36mmφ	16mmφ	100枚	700円	4987167010645
タペイブジュ	No.30A	30mmφ	10mmφ	120枚	700円	4987167013226
	No.36A	36mmφ	16mmφ	100枚	700円	4987167013233