

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000  
**オーキューバンエコ™**


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、ポリエチレンフィルム基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。  
本品は滅菌済みである。

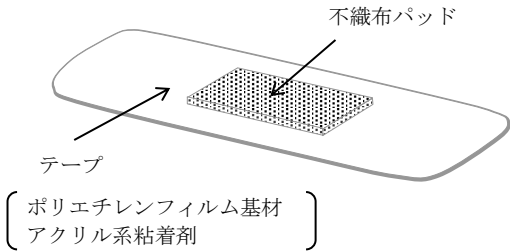

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問い合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark

\*, \*\*

	テープ	パッド
Sサイズ	12mm×55mm	7.5mm×17mm
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm
Lサイズ	30mm×72mm	22mm×29mm
キャラクター（円型）	直径30mm	13mm×13mm

**【使用目的又は効果】**

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

**【使用方法等】**

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッドをあてて周りのテープを伸ばさずに貼付する。

**【使用上の注意】**

**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。

**2.その他の注意**

**\*\*1)** 個包装紙に天然ゴムラテックスを使用している。

- 2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 3) 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。