

医療用品(4) 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000

**ステプティ®**

STEPTY®

再使用禁止

### 【警告】


本品は、末梢静脈の止血・被覆保護を目的としたものであり、末梢静脈以外の部位には使用しないこと。[末梢静脈以外に使用した場合、当該製品としての機能を果たすことができず、止血不全や空気塞栓等を起こす可能性がある。]

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性のあるウレタン不織布にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、積層不織布パッドからなる圧迫止血用ドレッシング材である。

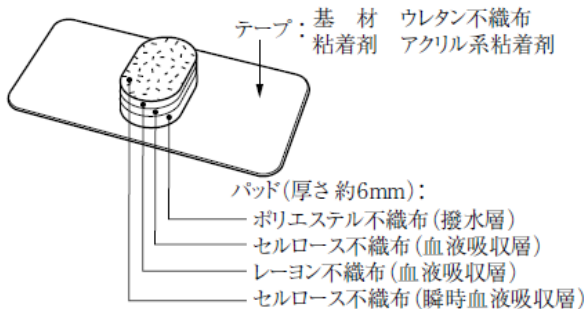

### 【使用目的、効能又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

### 【品目仕様等】

滅菌済み

### 【操作方法又は使用方法等】

採血、輸血、点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護

- 1) 包装を開いて本品を取り出す。
- 2) 針又はカテーテルを抜く直前に、パッド長径が血管の走行に一致する向きで血管刺入点にパッドを当て、軽く仮止めする。
- 3) パッドに軽く指をそえながら、針又はカテーテルを抜く。抜去と同時に、そえていた指でパッドを強めに圧迫する。
- 4) パッドを圧迫しながら、片方ずつ粘着テープ部を1cm程度引き伸ばし、皮膚にしっかり貼付する。

### 【使用上の注意】

#### 1.重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に、創部に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や浸出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。
- 3) 血管や皮膚の損傷を避けるため、必ず抜針してから貼付す

ること。

- 4) テープを必要以上に伸ばして貼ると、皮膚刺激の原因となるので注意すること。
- 5) 皮膚刺激をできるだけ避けるため、貼付時間は2時間以内を目安にすること。
- 6) はがしたときは、止血していることを必ず確認すること。止血が不十分だった場合は、用手圧迫止血等の適切な処置をすること。
- 7) はがしたあとは、穿刺部を救急絆創膏等で保護すること。

### 2.その他の注意

- 1) 包装に汚れや破損、水濡れなどがあるものは使用しないこと。
- 2) 開封後は、直ちに使用すること。
- 3) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法： 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存。

使用期限： 個箱に表示（自己認証データによる）

### 【包装】

基材色：白色

品番	サイズ		1箱
	テープ	パッド	
No.80	39mm×80mm	27mm×15mm (約6mm厚)	50枚

基材色：ベージュ色

品番	サイズ		1箱
	テープ	パッド	
No.80A	39mm×80mm	27mm×15mm (約6mm厚)	50枚

### 【製造販売業者及び製造業者の名称、住所等】

[ 製造販売元・発売元 ]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TEL 03-5978-5622

[ 製造元 ]

ニチバンメディカル株式会社

[ お問合わせ窓口 ]

ニチバン株式会社 お客様相談室

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TEL 03-5978-5622

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

®は登録商標です。