

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000
ステプティ™
STEPTY™

再使用禁止

【警告】


本品は、末梢静脈の止血・被覆保護を目的としたものであり、末梢静脈以外の部位には使用しないこと。[末梢静脈以外に使用した場合、当該製品としての機能を果たすことができず、止血不全や空気塞栓等を起こす可能性がある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性のあるウレタン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、積層不織布パッドからなる採血、輸血、点滴後の末梢静脈の圧迫止血・被覆保護用ドレッシング材である。本品は滅菌済みである。

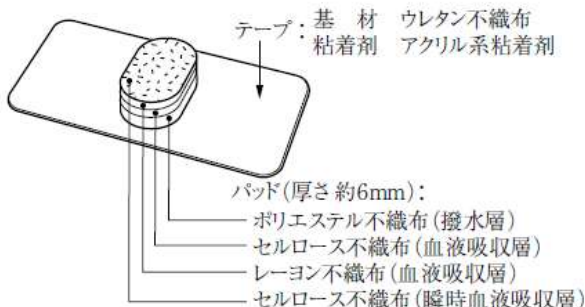

基材色：白色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.80	39mm×80mm	27mm×15mm (約6mm厚)

基材色：ベージュ色

品番	サイズ	
	テープ	パッド
No.80A	39mm×80mm	27mm×15mm (約6mm厚)

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 包装を開いて本品を取り出す。
- 2) 針又はカテーテルを抜く直前に、パッド長径が血管の走行に一致する向きで血管刺入点にパッドを当て、軽く仮止めする。
- 3) パッドに軽く指をそえながら、針又はカテーテルを抜く。抜去と同時に、そえていた指でパッドを強めに圧迫する。

- 4) パッドを圧迫しながら、片方ずつ粘着テープ部を1cm程度引き伸ばし、はがれないように皮膚に貼付する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ※1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。
- 3) 血管や皮膚の損傷を避けるため、必ず針又はカテーテルを抜いてから貼付すること。
- 4) テープを必要以上に伸ばして貼ると、皮膚刺激の原因となるので注意すること。
- 5) 皮膚刺激をできるだけ避けるため、貼付時間は2時間以内を目安にすること。
- 6) はがしたときは、止血していることを必ず確認すること。止血が不十分だった場合は、用手圧迫止血等の適切な処置を行うこと。
- 7) はがしたあとは、穿刺部を救急絆創膏等で保護すること。

2.その他の注意

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
- 2) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

※ **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark