

# エラストポア™ / エラストポア™ハダ

ELASTPORE™ / ELASTPORE™HADA



## 特 長

### ■高固定性

粘着力が高く、重ね貼りができるため、固定性に優れています。

### ■適度な伸縮性

適度な伸縮性があり、関節部など屈曲部位にもよくフィットし、圧迫・固定に優れています。

### ■適度な透湿性

### ■圧迫固定・支持固定に十分な基材強度

### ■はく離紙に1cm間隔の目盛り付き

## 規 格

### エラストポア™

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×5m	24巻
No. 25	25mm×5m	12巻
No. 38	38mm×5m	8巻
No. 50	50mm×5m	6巻
No. 75	75mm×5m	4巻
No.100	100mm×5m	3巻

## 用 途

○ ガーゼ、パッド、シップ剤の固定 ○ カテーテル、チューブ、シーネの固定

○ 止血処置における圧迫固定

○ 捻挫、肉ばなれの予防の支持固定、リハビリテーション時の支持固定

### 〈使用上の注意〉

- 伸ばした状態で貼ると皮膚刺激の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- 使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどに粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

### エラストポア™ハダ

品番	サイズ	1箱
No. 25	25mm×5m	12巻
No. 38	38mm×5m	8巻
No. 50	50mm×5m	6巻
No. 75	75mm×5m	4巻
No.100	100mm×5m	3巻