


# メッシュポア™ / メッシュポア™K

MESHPORE™ / MESHPORE™K

(個箱タイプ)



■メッシュポア™

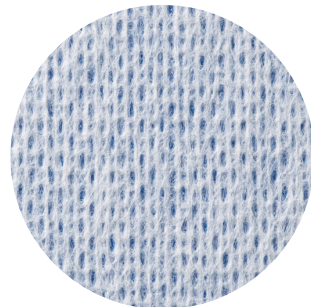

■メッシュポア™K (個箱タイプ)

## 特 長

### ■高固定性

粘着力が高く、各部位によく付いて、被覆保護・固定性に優れています。

### ■柔軟性

しなやかな基材で屈曲部位、関節部位にもよくフィットします。

### ■適度な透湿性

### ■はく離紙に1cm間隔の目盛り付き

## 規 格

### メッシュポア™

品番	サイズ	1箱
No. 25	25mm×10m	12巻
No. 38	38mm×10m	8巻
No. 50	50mm×10m	6巻
No. 75	75mm×10m	4巻
No.100	100mm×10m	3巻

### メッシュポア™K

品番	サイズ	1箱
No. 25K	25mm×10m	2巻
No. 38K	38mm×10m	1巻
No. 50K	50mm×10m	1巻
No. 75K	75mm×10m	1巻
No.100K	100mm×10m	1巻

## 用 途

- ガーゼ、パッド、シップ剤の固定
- カテーテル、チューブの固定
- ギプスの辺縁被覆保護

#### 〈使用上の注意〉

- 伸ばした状態で貼ると皮膚刺激の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- 使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどに粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。