

SKINERGATE™

スキナゲート™

■規格

品番	サイズ	1箱
SG12	12mm×7m	24巻
SG25	25mm×7m	12巻
SG50	50mm×7m	6巻



SKINERGATE™ MESH

スキナゲート™ メッシュ

■規格

品番	サイズ	1箱
SGM12	12mm×7m	24巻
SGM25	25mm×7m	12巻
SGM50	50mm×7m	6巻



SKINERGATE™ SPATT


スキナゲート™ スパット

■規格


品番	サイズ	1箱
SGS12	12mm×7m	24巻
SGS25	25mm×7m	12巻
SGS50	50mm×7m	6巻




テープを引っ張らず、静かに置くように貼ってください。

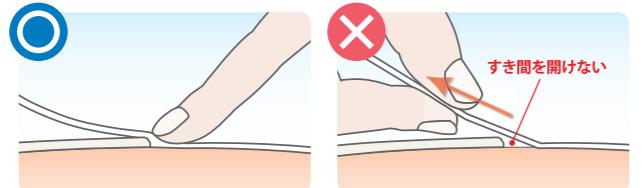

皮膚が伸びないように皮膚を指で押さえながらゆっくりとはがしてください。

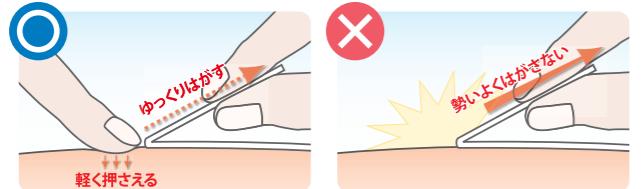

テープエッジ部に刺激が出るので井型ではなく、囲うように貼ってください。

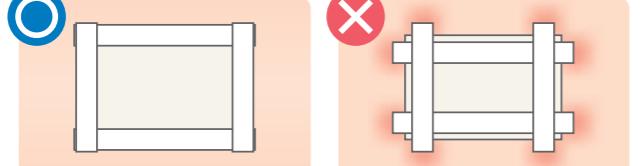

■ 使用上の注意

- 伸ばした状態で貼付すると皮膚刺激の原因となります。**テープは引っ張って貼付しないでください。**
- 傷口には直接貼らないでください。
- 体動が激しい場合やテープに負担がかかり過ぎるとはがれことがあります。
- 使用中は、固定のズレやテープのはがれについて十分観察し、必要に応じて固定を補強してください。
- 使用中に、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

■ 保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のある場所を避けて、室温で保管してください。

ガーゼの固定例

スキナゲート™ | スキナゲート™ メッシュ | スキナゲート™ スパット



スキナゲート™ シリーズ

かぶれにくさを追求した医療用固定テープ

患者様と医療を結ぶ 絆 をかたちに

TMは商標です。

FOR BETTER BEING
いつも笑顔でいたいから —ニチバン—

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

●ホームページ: <http://www.nichiban.co.jp/>

MADE IN JAPAN

SEN189ATA

Safety
Easy Operation
Accuracy

Safety: 安全な製品づくりを通して安心をお届けします。

Easy Operation: どなたにとっても使いやすい製品を目指します。

Accuracy: 信頼される確かな品質を追求し続けます。


ニチバンは、SEAに基づいた製品づくりにより、医療の発展に貢献します。

かぶれにくさを追求した

スキナゲートTMシリーズ

スキナゲートTMシリーズは、日本人の皮膚にあわせて
ムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した、
日本製の医療用固定テープです。

柔軟性

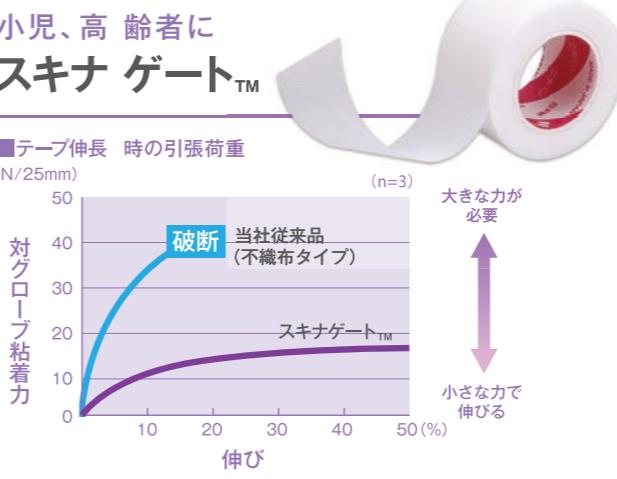

テープ基材に柔軟性の高いポリオレフィン系フィルムの採用により、小さな力でもよく伸び、貼付中は皮膚と一緒に動く皮膚の小さな動きに追従します。

様々なシーンで…

α 固定
の貼付



Ω 固定
の貼付



ガーゼ固定
の貼付




手術室、透析で スキナゲートTMメッシュ



長時間の貼付でも、
従来品と同等の皮膚粘着力を維持したまま、
はく離角質細胞量は少なくなりました。

固定性

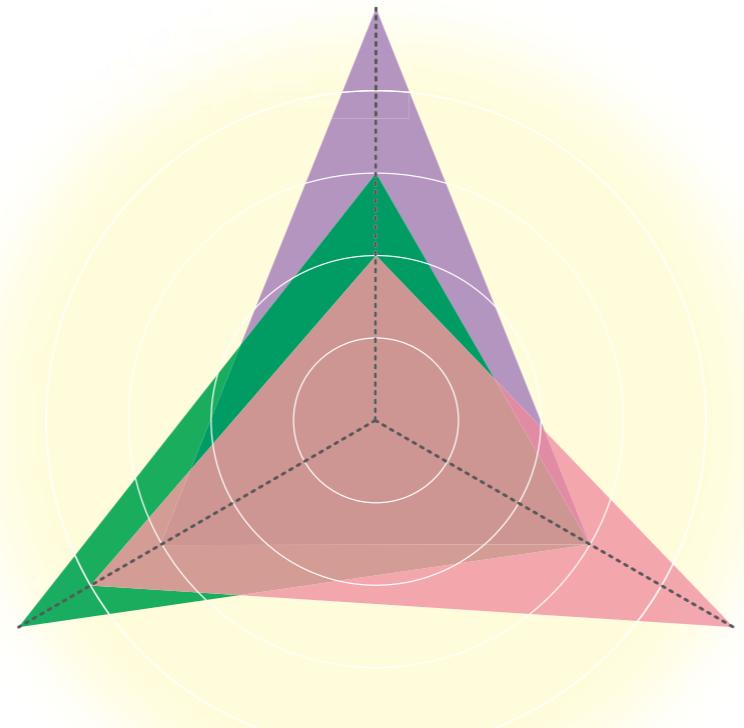

作業性



スキナゲートTMシリーズの特長


スキナゲートTMシリーズは、
皮膚刺激を徹底追求して生まれました。

皮膚刺激は、大きく分けて5つの要因が考えられます。
まず、皮膚の動きを妨げる「貼付中の皮膚ストレス」、ムレによって細菌の繁殖などをもたらす「皮膚表面の長期密封」、角質はく離などによる「はく離時の皮膚へのストレス」、さらに、粘着剤の「成分による化学的刺激」や「成分による感作」があげられます。ニチバンでは、これらすべての刺激について研究を重ね、独自の技術力で、かぶれにくさを実現するスキナゲートTMシリーズを開発しました。


高い透湿性がムレを防ぎ、皮膚刺激を抑えます。

スキナゲートTMシリーズは従来のアクリル系粘着剤と比較し、水蒸気が通りやすい高透湿性アクリル系粘着剤と高透湿性基材を採用。長時間の貼付でも汗の貯留を抑えることができます。

透湿性比較
イメージ図

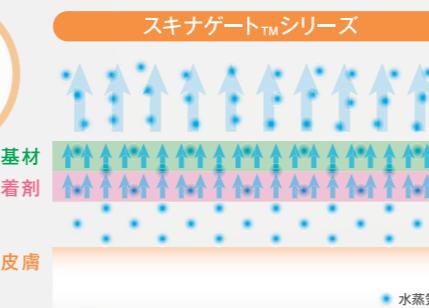



当社従来品(不織布タイプ)

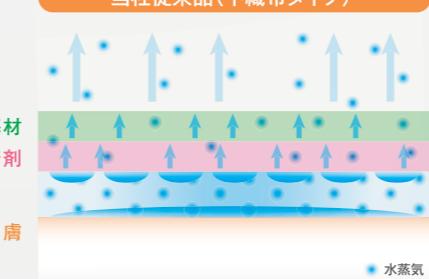

皮膚にやさしい粘着力と、ムレにくい構造で
角質を保護し、はがす時の痛みも軽減。

はく離角質細胞
顕微鏡写真
(24時間貼付後)

青色部分：
はく離角質

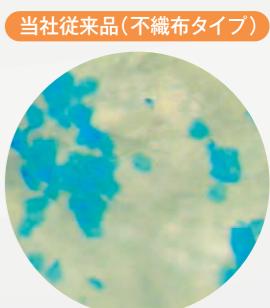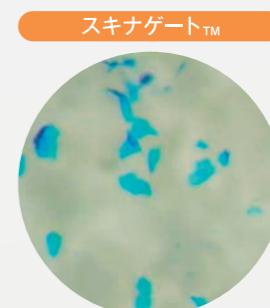

※データはすべて社内データであり、保証値ではありません。