

SKINERGATE™
スキナゲート™

■規格

品番	サイズ	1箱
SG12	12mm×7m	24巻
SG25	25mm×7m	12巻
SG50	50mm×7m	6巻



SKINERGATE™MESH
スキナゲート™メッシュ

■規格

品番	サイズ	1箱
SGM12	12mm×7m	24巻
SGM25	25mm×7m	12巻
SGM50	50mm×7m	6巻



SKINERGATE™SPATT
スキナゲート™スパット

■規格

品番	サイズ	1箱
SGS12	12mm×7m	24巻
SGS25	25mm×7m	12巻
SGS50	50mm×7m	6巻



スキナゲート™ | スキナゲート™メッシュ | スキナゲート™スパット




スキナゲート™シリーズ

かぶれにくさを追求した医療用固定テープ


テープの貼り方例

テープを引っ張らず、静かに置くように貼ってください。

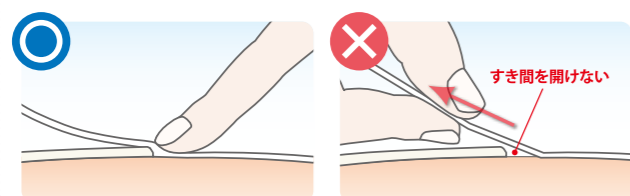


テープのはがし方例

皮膚が伸びないように皮膚を指で押さえながらゆっくりとはがしてください

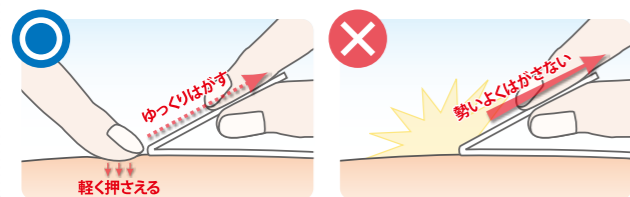

ガーゼの固定例

テープエッジ部に刺激が出るので井型ではなく、囲うように貼ってください。

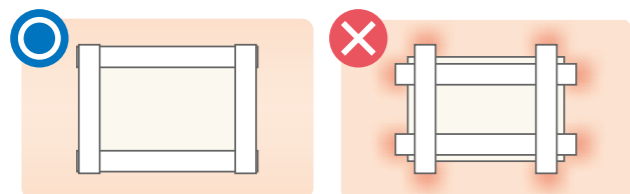

■使用上の注意

- 伸ばした状態で貼付すると皮膚刺激の原因となります。テープは引っ張って貼付しないでください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 体動が激しい場合やテープに負担がかかり過ぎるとはがれることがあります。
- 使用中は、固定のズレやテープのはがれについて十分観察し、必要に応じて固定を補強してください。
- 使用中に、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

■保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管してください。

患者様と医療を結ぶ絆をかたちに

Safety
Easy Operation
Accuracy

Safety: 安全な製品づくりを通して安心をお届けします。
Easy Operation: どなたにとっても使いやすい製品を目指します。
Accuracy: 信頼される確かな品質を追求し続けます。
ニチバンは、SEAに基づいた製品づくりにより、医療の発展に貢献します。

かぶれにくさを追求した


スキナゲート™シリーズ

スキナゲート™シリーズは、日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した、日本製の医療用固定テープです。

小児、高齢者にスキナゲート™



柔軟性

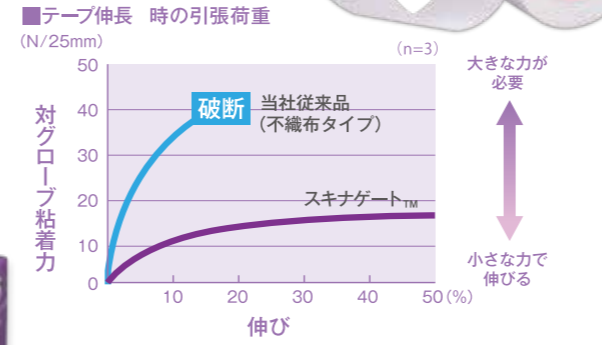

テープ基材に柔軟性の高いポリオレフィン系フィルムの採用により、小さな力でもよく伸び、貼付中は皮膚と一体となつて皮膚の小さな動きに追従します。

様々なシーンで...

α固定の貼付 ▶▶▶




Ω固定の貼付 ▶▶▶



ガーゼ固定の貼付 ▶▶▶




手術室、透析でスキナゲート™メッシュ

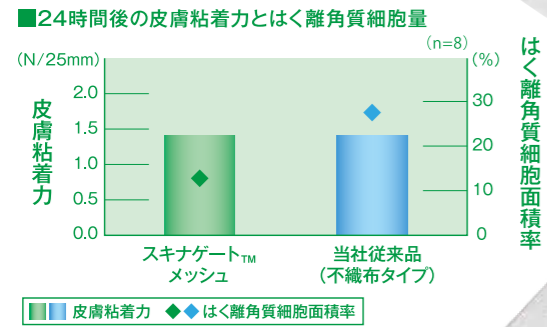

固定性


長時間の貼付でも、従来品と同等の皮膚粘着力を維持したまま、はく離角質細胞量は少なくなりました。

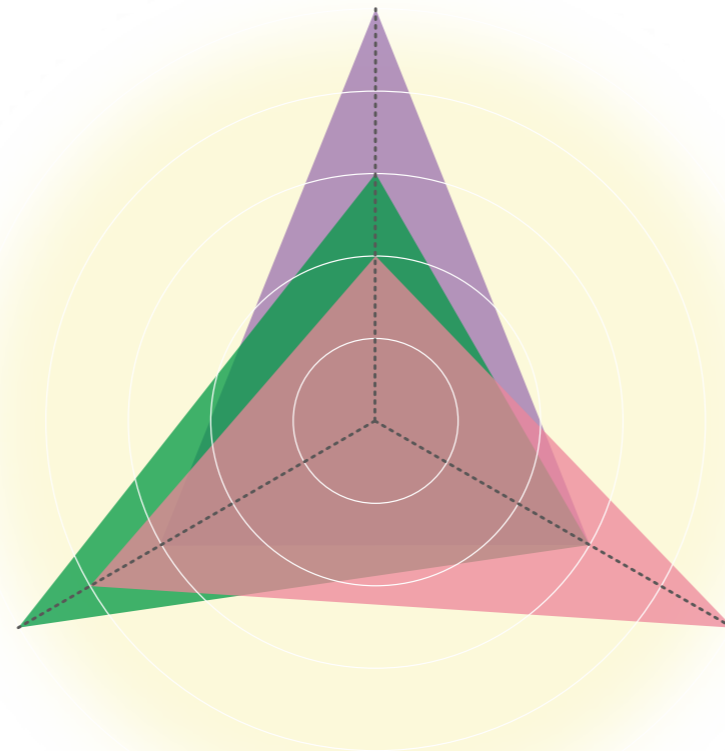

作業性



外来、病棟、透析でスキナゲート™スパット

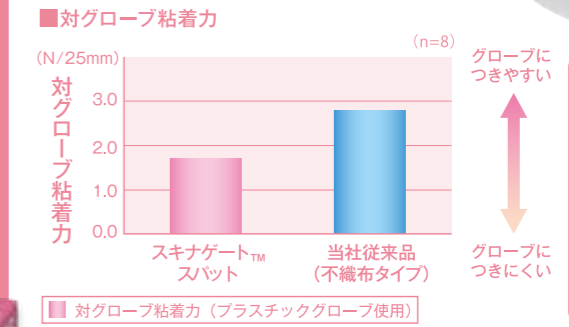

ハサミがなくても、まっすぐきれいに切ることができ、グローブにまわりつきにくくなっています。グローブ着用のまま作業できるので感染リスクの軽減が期待でき、作業時間の短縮にも貢献できます。


スキナゲート™シリーズの特長

スキナゲート™シリーズは、皮膚刺激を徹底追求して生まれました。


皮膚刺激は、大きく分けて5つの要因が考えられます。まず、皮膚の動きを妨げる「貼付中の皮膚ストレス」、ムレによって細菌の繁殖などをもたらす「皮膚表面の長期密封」、角質はく離などによる「はく離時の皮膚へのストレス」、さらに、粘着剤の「成分による化学的刺激」や「成分による感作」があげられます。ニチバンでは、これらすべての刺激について研究を重ね、独自の技術力で、かぶれにくさを実現するスキナゲート™シリーズを開発しました。

高い透湿性がムレを防ぎ、皮膚刺激を抑えます。

スキナゲート™シリーズは従来のアクリル系粘着剤と比較し、水蒸気が通りやすい高透湿性アクリル系粘着剤と高透湿性基材を採用。長時間の貼付でも汗の貯留を抑えることができます。

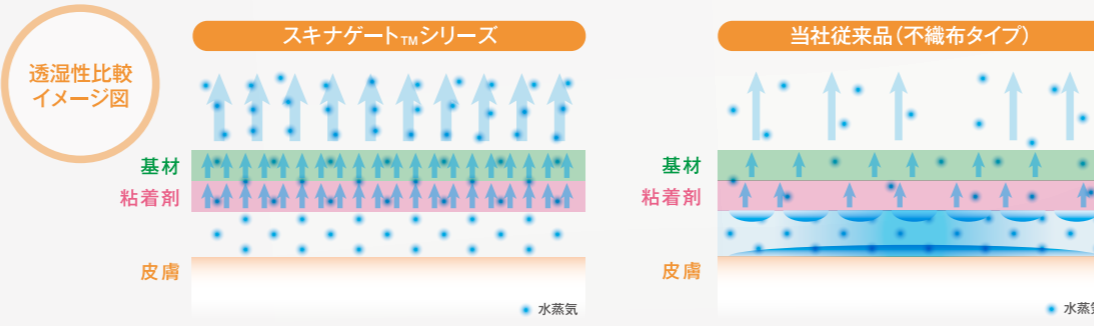

皮膚にやさしい粘着力と、ムレにくい構造で角質を保護し、はがす時の痛みも軽減。

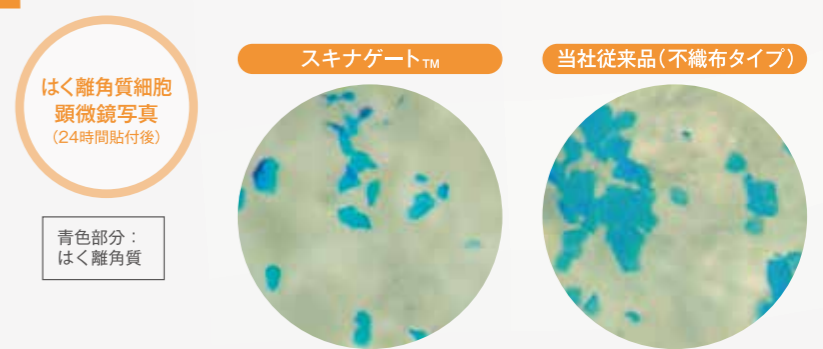

※データはすべて社内データであり、保証値ではありません。